

Perspectiva temprana sobre el desarrollo de su bebé



Lacey O.


Usó la prueba Prelude Prenatal Screen
mientras estaba embarazada de su hija

En la semana 10, hágase una prueba no invasiva para descubrir si su bebé tiene un mayor riesgo de sufrir una afección cromosómica, como el síndrome de Down.

¿POR QUÉ ESTA PRUEBA DE DETECCIÓN ES IMPORTANTE?

Las pruebas de detección de ADN sin células ofrecen muchos beneficios importantes

La prueba de **Counsyl Prelude™ Prenatal Screen** le ofrece una perspectiva temprana sobre el desarrollo de su bebé, lo cual le brinda información sobre la probabilidad de que padezca una afección cromosómica, como el síndrome de Down.

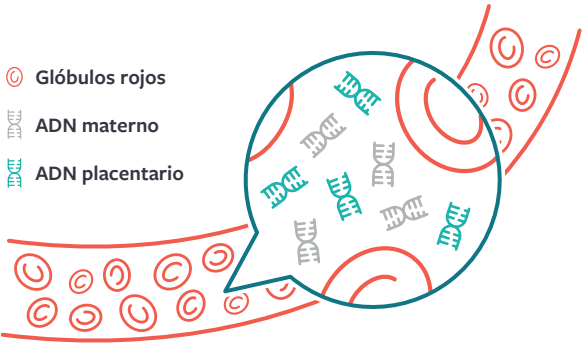

Los procesos de desarrollo normales hacen que pequeñas porciones de ADN de la placenta del bebé entren en el flujo sanguíneo de la madre. La prueba Prelude Prenatal Screen analiza esos fragmentos, que se denominan “ADN libre en sangre”.

Las pruebas de detección reducen la necesidad de hacer pruebas de diagnóstico invasivas

Las pruebas de detección prenatales no invasivas con ADN libre en sangre han demostrado ser más precisas que las pruebas de detección en suero materno, lo que reduce las probabilidades de que necesite pruebas de seguimiento invasivas, como el muestreo de vellosidades coriónicas (CVS) o amniocentesis.

Nuestros resultados se personalizan en función de su edad y su tiempo de embarazo, por lo que puede confiar en los resultados de la prueba de detección para decidir si necesita someterse a pruebas adicionales.

Analizamos las afecciones cromosómicas más graves

Algunos bebés nacen con una cantidad de cromosomas diferente

La mayoría de los bebés tiene 46 cromosomas, 23 de cada padre. Ocasionalmente, un bebé tiene un cromosoma adicional. Eso se llama trisomía. Los bebés que nacen con trisomía pueden tener problemas de salud graves, incluidos defectos de nacimiento, discapacidades intelectuales y un tiempo de vida reducido.

La prueba Prelude Prenatal Screen busca las tres trisomías más frecuentes:

- **Síndrome de Down** *Trisomía 21*
- **Síndrome de Edwards** *Trisomía 18*
- **Síndrome de Patau** *Trisomía 13*

Las personas con síndrome de Down tienen discapacidades intelectuales leves a moderadas y pueden tener una vida larga. Con ayuda, pueden participar en actividades familiares, escolares y comunitarias. En general, los bebés con síndrome de Edwards o con síndrome de Patau solo viven unos pocos días, semanas o meses.

Su proveedor de atención médica puede ayudarle a decidir si debe hacerse pruebas para detectar afecciones menos frecuentes y menos graves

Las pruebas de detección Prelude Prenatal Screen también se pueden usar para comprobar si su bebé tiene la cantidad de cromosomas sexuales correcta, lo que puede tener repercusiones en cuestiones de salud como la fecundidad. Además, las pruebas de detección pueden indicar si a su bebé le falta una pequeña parte de un cromosoma (llamado “microdelección”), lo que puede dar lugar a defectos de nacimiento y discapacidades intelectuales.

La prueba Prelude Prenatal Screen es rápida y fácil



Se extrae una muestra de sangre de su brazo y se envía a Counsyl



La muestra se analiza en nuestro laboratorio



Los resultados están disponibles en aproximadamente una semana



Se ofrecen consultas con un asesor genético certificado por la junta



Si le interesa saberlo, esta prueba de detección también puede predecir el sexo de su bebé

Ya tiene sus resultados. ¿Qué sucede después?

Si desea una perspectiva temprana del desarrollo de su bebé, la prueba Prelude Prenatal Screen es un primer paso importante. Si su prueba de detección muestra algo inusual, su proveedor de atención médica le informará de qué se trata y le ofrecerá un procedimiento de diagnóstico de seguimiento para confirmar los resultados.

Muestreo de vellosidades coriónicas (CVS)

Antes de las 14 semanas de embarazo, el médico puede tomar una pequeña muestra de la placenta para confirmar el resultado de la prueba Prelude Prenatal Screen.

Amniocentesis

Entre las semanas 16 y 22 del embarazo, el médico puede tomar una pequeña muestra de líquido del útero para confirmar los resultados de la prueba Prelude Prenatal Screen.

Preparación

Decida o no someterse a una prueba de diagnóstico, existen muchas cosas que puede hacer para planificar el nacimiento de su bebé y prepararse para este acontecimiento. Estas pueden comprender hablar con un especialista o buscar un centro especializado para el parto. Puede planificar intervenciones tempranas para su bebé. O tal vez quiera hablar con uno de nuestros asesores genéticos o trabajar con un grupo de apoyo para comprender lo que le espera.



Para obtener más información, visite counsyl.com/prelude

Le damos cobertura

Creemos que todos los que quieran someterse a una prueba de detección deben poder hacérsela.

Amplia cobertura de seguro

La prueba Prelude Prenatal Screen está cubierta por la mayoría de los principales planes de seguros. Si tiene un seguro, lo más probable es que la prueba esté en su plan. Tenemos opciones para ayudarle a manejar un deducible alto si tiene uno.

Compromiso para que las pruebas genéticas sean asequibles para todos

Counsyl puede ofrecer pruebas sin cargo a aquellos que reúnen los requisitos. Estos se basan en diferentes factores, incluidos sus ingresos familiares totales, el tamaño de su familia y los gastos médicos anuales de su familia.

Todos los pacientes pueden solicitar planes de pago sin intereses. También está disponible la opción de pago en efectivo.



Para obtener más información sobre la cobertura de Counsyl, visite counsyl.com/access o llame al (888) 268-6795

¿Por qué Counsyl?

Nos dedicamos a realizar pruebas de detección prenatales no invasivas, disponibles para todas las mujeres

La prueba Prelude Prenatal Screen usa ciencia y tecnología de avanzada que funciona bien para las mujeres embarazadas de todas las edades, incluidas las embarazadas de mellizos o con donante.

Apoyo cuando lo necesita

Queremos que tenga todo el apoyo que necesita. Todas las pruebas Prelude Prenatal Screen comprenden consultas a pedido con nuestros asesores genéticos, y nuestros especialistas de pagos pueden ayudarle con los problemas de facturación que tenga.



¿Tiene alguna pregunta?

Nuestros especialistas están disponibles:

6:00 a. m.–5:00 p. m. PST

De lunes a viernes

Teléfono (888) 268–6795

Correo electrónico

support@counsyl.com

Chat counsyl.com



La prueba Prelude Prenatal Screen me ayudó a dormir mejor porque obtener respuestas —de una u otra forma— es un gran alivio. Realmente creo que este tipo de ciencia personalizada y no invasiva indica un futuro brillante para la medicina.

— LACEY O. y SEJIN H.

Counsyl es una compañía de tecnología de la salud que analiza su ADN en busca de afecciones que pudieran influir en usted o en sus hijos.

Ofrecemos dos pruebas de detección prenatal para mujeres embarazadas:

Foresight™ Carrier Screen

Busca afecciones hereditarias, como la fibrosis quística.

Prelude™ Prenatal Screen

Busca afecciones cromosómicas, como el síndrome de Down.

