



Lacey O.

Recorreu ao Prelude Prenatal Screen quando estava grávida da sua filha


A partir das 10 semanas pode fazer uma análise não invasiva ao sangue para saber se o seu bebé tem um risco acrescido de doenças cromossómicas, como a síndrome de Down.

Conhecimento precoce sobre o desenvolvimento do seu bebé

QUAL A IMPORTÂNCIA DESTES RASTREIOS?

O rastreio baseado em ADN livre apresenta vários benefícios importantes

O **Counsyl Prelude™ Prenatal Screen** fornece informações precoces sobre o desenvolvimento do feto, como a probabilidade de ter uma doença cromossómica como a síndrome de Down.

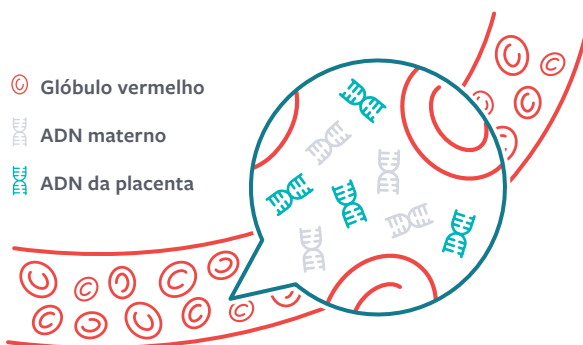

Os processos de desenvolvimento normais causam a libertação de pequenos fragmentos de ADN da placenta do feto na corrente sanguínea da mãe. Estes fragmentos, denominados ADN livre, são analisados pelo Prelude Prenatal Screen.

O rastreio reduz a necessidade de testes de diagnóstico invasivos desnecessários

O rastreio pré-natal não invasivo com base no ADN livre demonstrou ser mais exato do que o rastreio no soro materno, reduzindo a probabilidade de ter de fazer um teste de follow-up invasivo desnecessário, como uma biópsia das vilosidades coriónicas (CVS) ou amniocentese.

Os nossos resultados são personalizados com base na sua idade e no tempo de gestação, para que possa ter todas as informações relativamente ao risco, o que pode ajudar a decidir se são necessários testes adicionais.

DOENÇAS DETETADAS NO RASTREIO

O rastreio verifica a existência das doenças cromossómicas mais graves

Algumas crianças nascem com um número diferente de cromossomas

Em condições normais, a maioria das crianças tem 46 cromossomas, 23 do pai e 23 da mãe. Por vezes, pode ter um cromossoma suplementar. Esta condição é denominada trissomia. As crianças que nascem com trissomia podem ter graves problemas de saúde, incluindo anomalias congénitas, deficiências mentais e uma esperança de vida curta.

O Prelude Prenatal Screen verifica a existência das três trissomias mais frequentes:

- Síndrome de Down *Trissomia 21*
- Síndrome de Edwards *Trissomia 18*
- Síndrome de Patau *Trissomia 13*

As pessoas com síndrome de Down apresentam um atraso mental ligeiro a moderado e têm uma esperança de vida longa. Com apoio, conseguem interagir e participar no seu núcleo familiar, nas escolas e na comunidade. Na maioria dos casos, as crianças com síndrome de Edwards ou de Patau sobrevivem apenas alguns dias, semanas ou meses.

O seu prestador de cuidados de saúde pode ajudá-la a decidir se deve verificar a existência de outras doenças

O Prelude Prenatal Screen também pode verificar se o feto tem o número correto de cromossomas sexuais, visto que esta anomalia pode ter impacto na saúde, como por exemplo na fertilidade. Além disso, o rastreio pode avaliar se existe perda de material cromossómico (uma “microdeleção”), a qual pode resultar em anomalias congénitas e deficiências mentais.

COMO FUNCIONA

O Prelude Prenatal Screen é rápido e simples



1 É colhida uma amostra de sangue do seu braço e enviada à Counsyl



2 A amostra é analisada no nosso laboratório



3 Os resultados são entregues em cerca de uma semana



4 Estão disponíveis consultas com um consultor genético certificado



Caso pretenda saber, este teste também pode revelar o sexo do seu bebé

PASSOS SEGUINTES

Já tem os resultados. Qual é o próximo passo?

Se pretende obter informações precoces sobre o desenvolvimento do seu bebé, o Prelude Prenatal Screen é um primeiro passo importante. Se o seu teste apresentar resultados anormais, o seu prestador de cuidados de saúde explicar-lhe-á o que significa e recomendará um procedimento de diagnóstico de acompanhamento para confirmar os resultados.

Biópsia das vilosidades coriónicas (CVS)

Antes da 14ª semana de gestação, o seu médico pode proceder à colheita de uma pequena amostra de placenta para confirmar o resultado do Prelude Prenatal Screen.

Amniocentese

Entre a 16ª e a 22ª semana de gestação, o seu médico pode proceder à colheita de uma pequena amostra de líquido amniótico do útero para confirmar o resultado do Prelude Prenatal Screen.

Preparação

Embora a maioria das mulheres receba resultados tranquilizantes, quando algo fora do comum é detetado no rastreio, há imensas coisas que pode fazer para planear e preparar o nascimento do seu filho — independentemente de optar ou não por fazer um teste de diagnóstico. Poderá querer falar com um médico especialista ou procurar um centro especializado nesta área. Poderão existir intervenções médicas que possam ser realizadas antecipadamente. Ou poderá optar por falar com um dos nossos consultores genéticos ou com um grupo de apoio para compreender o que irá acontecer.

O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA COUNSYL

Cuidamos de si

Empenhados em tornar os rastreios genéticos acessíveis

Sabemos que cada situação é única. Por isso criámos o Counsyl Access, um programa abrangente concebido para disponibilizar rastreios genéticos a um maior número de doentes.

O Programa de avaliação da Counsyl tem três componentes chave concebidos para o ajudar a tomar decisões informadas quanto à sua saúde, à sua família e ao seu futuro.

- Estimativas de custos personalizadas fornecidas por e-mail e/ou SMS
- Inclusão na rede da maioria dos planos de saúde
- Oferta de opções de pagamento para as despesas incorridas
 - Caso a despesa incorrida seja avultada, poderá ser aplicável um desconto de pronto pagamento, caso efetue o pagamento no prazo de 45 dias a partir da receção da fatura.
 - Poderá ser elegível para um rastreio gratuito com base no número de elementos, rendimento e nas despesas médicas do seu agregado familiar.
 - Estão disponíveis planos de pagamento sem juros mediante o pagamento do montante total faturado, independentemente da situação financeira.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A COUNSYL

Porquê a Counsyl?

Estamos empenhados em tornar o rastreio pré-natal não invasivo acessível a todas as mulheres

O Prelude Prenatal Screen utiliza ciência e tecnologia avançadas adequadas para mulheres grávidas de todas as idades e pesos. Este rastreio resulta mesmo que esteja grávida de gémeos ou que tenha recebido óvulos de uma dadora.

Acompanhamento à sua medida

Queremos que tenha todo o acompanhamento necessário. Todos os rastreios Foresight Carrier Screen incluem consultas agendadas ou a pedido com os nossos consultores genéticos. Os nossos especialistas em pagamentos poderão esclarecer todas as dúvidas relacionadas com faturação.

➤ Para obter mais informações, visite counsyl.com/prelude

➤ Tem dúvidas?

Os nossos especialistas estão disponíveis entre as **6:00 e as 17:00**, de segunda a sexta-feira

Telefone: (888) 268 6795

Contacto online: counsyl.com/contact

